

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano	FOGLIO INFORMATIVO QUANTIFERON-TB GOLD PLUS	Rev.0	Pag. 1 di 1
		LAB-FI-006	

MODALITA' DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Per eseguire il test sono necessarie 4 provette dedicate Quantiferon-TB GOLD PLUS:

- provetta tappo grigio/controllo negativo
- provetta tappo verde/TB1 (CD4)
- provetta tappo giallo/TB2 (CD8)
- provetta tappo viola/controllo mitogeno

Le provette sono fornite dal Laboratorio del P.O. Bassini e devono essere conservate in frigorifero fino al momento dell'uso (cella frigorifera).

1. Per ciascun soggetto in esame prelevare 1 mL di sangue per venopuntura direttamente in ognuna delle provette dedicate Quantiferon-TB GOLD PLUS:

- Dato che nelle provette da 1 mL il sangue fluisce con relativa lentezza, mantenere la provetta sull'ago per altri 2-3 secondi dopo che sembra riempita completamente per accertarsi di aver prelevato il volume corretto.
- La linea nera sul lato delle provette indica il volume di riempimento di 1 mL. Le provette per il prelievo del sangue Quantiferon-TB GOLD PLUS sono state validate per volumi che variano da 0.8 a 1.2 mL. Se il livello di sangue in una qualunque delle provette non raggiunge la linea indicata, si consiglia di prelevare un altro campione di sangue.

2. Miscelare il contenuto delle provette capovolgendo per 8-10 volte o scuotendole per 5 secondi, verificando che l'intera superficie interna della provetta sia ricoperta di sangue

- **E' fondamentale agitare accuratamente per garantire che il campione di sangue si mescoli completamente al contenuto della provetta.**
- **Il campione non deve essere refrigerato.**

	<i>Codice HOpera</i>
TEST Quantiferon –CN3355	0090774
Reattività al mitogeno –CN3356	0090773
Analisi tecnica (no refertazione) –CN3357	

Effettuare e consegnare il prelievo ematico entro le ore 11.30